



REF	530-2	6×3mL	EXP	2025-06-05	LOT	T290DFE	更新日期：	2023-11
								1 / 2

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(CK-MB mass)肌酸激酶-MB质量	(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)	(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物	(hs-CRP)超敏C反应蛋白	(Myo / Mb)肌红蛋白
(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体	(TnT)肌钙蛋白T	

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF

530-2

6×3mL

EXP

2025-06-05

LOT

T290DFE

更新日期：

2023-11

2 / 2

批号：T290DFE			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(CK-MB mass)肌酸激酶-MB质量			
Beckman UniCel Dxi 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	21.4	16.3-26.5
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	13.4	10.2-16.6
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	ng/mL	23.4	18.7-28.1
(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	U/L	14.6	11.1-18.1
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)			
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	mg/L	0.363	0.291-0.435
Sysmex CS 5100 sysmex \ Nephelometry	mg/L	1.3	0.986-1.61
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物			
Sysmex CS 5100 sysmex \ Nephelometry	mg/L	2.75	2.09-3.41
(hs-CRP)超敏C反应蛋白			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	5.35	4.07-6.63
(Myo / Mb)肌红蛋白			
Beckman UniCel Dxi 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	179	136-222
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	171	130-212
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	μg/L	120	96-144
(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	400	304-496
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	47.1	35.8-58.4
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	pg/mL	1010	806-1210
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	pmol/L	120	96-144
(TnT)肌钙蛋白T			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.332	0.252-0.412
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	ng/mL	0.24	0.192-0.288
Radiometer AQTSeries Dedicated(批号:24441/24403/24175) \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	ng/mL	0.27	0.216-0.324

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。