

REF 666-1	6x3mL	EXP 2022-05-21	LOT 3F86BEA	更新日期： 2022-03 1 / 1
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

批号：3F86BEA				
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
(BASO %)嗜碱性粒细胞 %				
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Calculate	%	20	5-35	
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Calculate	%	20	5-35	
(EOS %)嗜酸性粒细胞 %				
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Calculate	%	10	0-20	
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Calculate	%	5	0-10	
(HCT)血细胞比容/压积				
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	%	16.6	13.4-19.8	
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	%	16.8	13.6-20	
(HGB/ Hb)血红蛋白				
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	g/L	53.4	42.2-64.6	
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	g/L	53.7	42.5-64.9	
(LYM %)淋巴细胞 %				
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Calculate	%	25	10-40	
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Calculate	%	25	10-40	
(MCH)平均红细胞血红蛋白含量				
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	pg	32.4	26-38.8	
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	pg	30.3	24.7-35.9	
(MCHC)平均红细胞血红蛋白浓度				
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	g/L	328	264-392	
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	g/L	326	264-388	
(MCV)平均红细胞体积				
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	fL	73	55-91	
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	fL	74	56-92	
(MONO %)单核细胞 %				
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Calculate	%	10	0-20	
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Calculate	%	10	0-20	
(NEUT %)嗜中性粒细胞 %				
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Calculate	%	50	35-65	
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Calculate	%	50	35-65	
(PLT)血小板				
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	Giga/L (1E +9/L)	55	35-75	
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	Giga/L (1E +9/L)	50	30-70	
(RBC)红细胞				
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	T/L (1E +12/L)	2.48	2.02-2.94	
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	T/L (1E +12/L)	2.49	2.01-2.97	
(WBC)白细胞				
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	Giga/L (1E +9/L)	3.32	2.66-3.98	
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	Giga/L (1E +9/L)	3.33	2.69-3.97	

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。