

# 尿液定量生化液体非定值质控品

## Liquid Unassayed Urine Chemistry Control

**REF** 货号 / Cat: **586-1; 586-2**  
规格 / Qty: **6 × 8 mL**

### [预期用途]:

本产品为非定值质控品, 用于监测和控制临床实验室检测方法的精密度。

### [摘要及原理]:

非定值质控品主要用于客观评估临床实验室检测方法的精密度, 也是实验室全面质量管理中不可缺少的一部分。

### [组成成份]:

本产品以人源成分为基础, 添加了高纯度生物提取物和化学品。为便于临床实验室使用, 本产品以冷藏液态形式提供。

### [储存条件及效期]:

未开瓶

2°C-8°C	可稳定至效期结束。
---------	-----------

开瓶后

2°C-8°C	可稳定保存 90 天。
-70°C~-20°C	开瓶并于30分钟内分装冷冻至-70°C~-20°C储存, 所有项目可稳定120天。 经过单次冻融后的样本需在1小时内检测, 检测后丢弃剩余样本。不可多次冻融。

在室温或冷藏条件下运输本产品。

### [适用仪器]:

本产品适用于检测参数列表所列项目的仪器设备。

### [使用方法]:

应将本产品视为患者样本, 并参照所使用的仪器、配件或试剂的说明进行操作。

- 从冰箱中取出质控品, 轻柔颠倒混匀 8-10 次, 以确保充分混匀。
- 开瓶, 用无污染吸管吸取足量本品置于样本杯中, 放置于室温环境复温。
- 每次完成取样后, 原瓶务必立即盖回瓶盖并放回冰箱储存。

### 注意:

- 已取样出的样本不得倒回原瓶中。
- 若发现包装破损, 请及时联系上海昆涑生物科技有限公司或本地销售商。

# Pretrol®

[参数列表]:

PARAMETERS	参数	PARAMETERS	参数	PARAMETERS	参数
Amylase	淀粉酶	Glucose	葡萄糖	Protein, Total	总蛋白
Creatinine	肌酐	Microalbumin	微量白蛋白	Potassium	钾
Chloride	氯	Magnesium	镁	Specific Gravity	比重
Calcium	钙	Osmolality	渗透压	Uric Acid	尿酸
Cortisol	皮质醇	pH	pH 值	Urea Nitrogen	尿素氮
hCG	人绒毛膜促性腺激素	Phosphorus	磷		

### [限制]:

- 本产品超出效期后切勿使用。
- 使用中若发现有微生物污染或浊度过高, 切勿使用。
- 本产品不能用作标准品。
- 丢弃本产品时, 请务必按照当地废弃物管理部门的要求进行处理。
- 专业用户可联系厂家或销售商索取物质安全数据文件 (MSDS)。

[警告]: 所有用于生产本产品的血源均使用国家食品药品监督管理局批准的方法进行了检验, 乙型肝炎表面抗原 (HBsAg)、丙型肝炎 (HCV) 抗体和 HIV1/HIV2 抗体均呈阴性。本品可能含有其他尚无合适检测方法的感染性病原体。按照良好实验室规范的要求, 所有人源物质均应视为具有潜在感染性, 并采取与患者样本相同的防范措施进行处理

### 参考文献 / REFERENCE

- CLSI. Statistical Quality Control for Quantitative Measurement Procedures: Principles and Definitions; Approved Guideline—Third Edition. CLSI document C24-A3. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2006.
- Westgard JO. Internal quality control: planning and implementation strategies. Ann Clin Biochem. 2003;593-611.

### 企业信息

生产企业: 上海华臣生物试剂有限公司  
医疗器械生产企业许可证编号: 沪食药监械生产许 20120954 号  
注册地址: 上海市嘉定区江桥镇沙河村二队  
生产地址: 上海市嘉定区马陆镇龙盘路 666 号  
邮编: 201801 电话: 021-69150383

售后服务: 上海昆涑生物科技有限公司  
地址: 上海虹口区中山北一路 1111 号 5 号楼  
邮编: 200437 电话: 021-55969126

**QUALAB** 上海昆涑生物科技有限公司  
Qualab Biotech Co., Ltd. (Shanghai)

示范实验室数据 / Peer Group Data: <http://www.china-qlab.com/sfsj.html>

注: 示范实验室数据是若干实验室的汇总数据, 仅供学习、参考之用。

根据具良好实验室规范的要求, 实验室需遵循相关技术规范确定自己的均值和可接受范围。



REF

产品货号

LOT

产品批号



产品效期



避光保存



警告, 查阅随附文件



制造商



温度条件