

HIV p24Ag 非定值质控品

Unassayed Serology Control

REF 货号 / Cat : 791-A;791-B;791-C;791-D;791-E

规格 / Qty : 6 × 1mL

【预期用途】：  
本产品为非定值质控品，用于监测和控制临床实验室检测方法的精密度。

【摘要及原理】：  
非定值质控品主要用于客观评估临床实验室检测方法的精密度，是实验室全面质量管理中不可缺少的一部分。

【组成成份】：  
本产品以灭活处理样本血清为基础，添加了稳定剂、稀释剂等，其性状为冷冻液态。

【储存条件及效期】：  
未开瓶

|           |             |
|-----------|-------------|
| -70℃～-20℃ | 可稳定保存至效期结束。 |
|-----------|-------------|

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 开瓶后       |                                                                             |
| 2℃～8℃     | 可稳定保存10天。                                                                   |
| -70℃～-20℃ | 可稳定保存60天。                                                                   |
| 分装        | 于30分钟内分装冷冻至-70℃~-20℃储存，稳定效期见【储存条件及效期】。经过单次冻融后的样本需在60分钟内检测，检测后丢弃剩余样本，不可多次冻融。 |

于冷冻，冷藏或室温条件下运输。

【适用仪器】：  
本产品适用于检测参数列表所列项目的仪器设备。在使用时无需配合专门的检测设备或检测试剂盒。

【使用方法】：  
应将本产品视为患者样本，并参照所使用的仪器、配件或试剂的说明进行操作。

- 1.从冰箱中取出质控品，于室温18℃~25℃静置至完全融解。
- 2.轻柔颠倒混匀8~10次，以确保充分混匀。
- 3.开瓶，取出足量样品置于样本杯中，或进行分装冷冻储存。
- 4.开瓶后，若采取2℃~8℃储存的策略，每次取样完成后，务必及时盖上瓶盖放入冰箱储存。
- 5.将取出的样品，室温静置15~20分钟，上机检测。

注意：  
1.已取出的样本不得倒回原瓶中。  
2.操作中请注意预防微生物污染。  
3.若发现包装破损，请及时联系售后服务商。



- 【限制】：
- 1.本产品超出效期后切勿使用。
  - 2.使用中若发现有微生物污染或浊度过高，切勿使用。
  - 3.本产品不能用作标准品或对照品。
  - 4.丢弃本产品时，请务必按照当地废弃物管理部门的要求进行处理。

【警告】：  
本产品所使用的生物原料已进行了灭活处理，但可能含有其他尚无合适检测方法的感染性病原体。按照良好实验室规范的要求,所有人源物质均应视为具有潜在感染性，并采用与患者样本相同的防范措施进行处理。

- 【参考文献】：
- 1.CLSI. Statistical Quality Control for Quantitative Measurement Procedures: Principles and Definitions; Approved Guideline—Third Edition. CLSI document C24-A3. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2006.
  2. Westgard JO. Internal quality control: planning and implementation strategies. Ann Clin Biochem. 2003;593-611.

【企业信息】：  
生产企业名称：上海惠中生物科技有限公司  
住所：上海市金山区山阳镇卫昌路1018号2幢3层、4层，3幢1层、2层、4层  
联系方式： 86-21-58547250/58990629  
生产地址：上海市金山区山阳镇卫昌路1018号3幢一层、二层北部、四层  
生产许可证编号：沪药监械生产许20120954号  
售后服务单位名称：上海昆涿生物科技有限公司  
电话： 021-55969126  
【说明书核准及修改日期】：  
核准日期：2024年01月29日  
【说明书版本号】：  
V7.0

QUALAB 上海昆涿生物科技有限公司  
Qualab Biotech Co.,Ltd.(Shanghai)

|      |      |      |      |           |     |      |
|------|------|------|------|-----------|-----|------|
| REF  | LOT  |      |      |           |     |      |
| 产品货号 | 产品批号 | 产品效期 | 避光保存 | 警告，查阅随附文件 | 制造商 | 温度条件 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 【参数列表】：               |                |                |
| 参数（Parameters）        | 参数（Parameters） | 参数（Parameters） |
| HIV-p24抗原(HIV-p24 Ag) |                |                |

示范实验室数据/ Peer Group Data: <http://www.china-qlab.com/sfsj.html>

注：示范实验室数据是若干实验室的汇总数据，仅供学习、参考之用。根据良好实验室规范的要求，实验室需遵循相关技术规范确定自己的均值和可接受范围。

